

## Instrucciones abreviadas MA 25/ MA 25e

### Descripción

El MA 25/ MA 25e es un audiómetro de screening de tono puro. El MA 25e amplía las funciones del MA 25 con el test de umbral controlado automáticamente por el paciente de Hughson Westlake y la función de voz.

### Función de los pulsadores

**Encender:** Pulse el pulsador de conmutación de tono (Tone Switch)

Atención: Encender solo es posible si los auriculares están conectados!

**Apagar:** Pulse el mando de nivel auditivo dB y el mando de la frecuencia Hz.

El audiómetro se apaga automáticamente después de 3, 4, 5 minutos o no dependiendo de los ajustes que se efectúan en el menú de ajustes. Alternativamente desconecte los auriculares.

**Frecuencia:** Gire el mando de frecuencia Hz para seleccionar otra frecuencia.

**Nivel:** Gire el mando de nivel auditivo dB para incrementar o disminuir el nivel.

**Encender/apagar el tono:** Pulse el pulsador de tono.

### Función de los pulsadores MA 25

F1	F2	F3	F4
Elija el oído derecho	Elija el oído izquierdo	Pulse encender/apagar	Vobular encender/apagar

### Pantalla

<b>30 dBHL 1000 Hz</b>
Derecha Izquierda Pulsar Vobular

**Tono:** Un indicador de presentación de tono está ubicado en la esquina izquierda de la parte superior de la pantalla.

**Contestar:** Utilizando el conmutador de respuesta del paciente, la respuesta está indicada en el medio de la parte superior de la pantalla.

**Estado de alimentación a red o por pila:** El estado de energía está indicado en la esquina derecha de la parte superior de la pantalla.

### Actualización del menú

Para acceder a la actualización del menú pulse F1 y F4 de forma simultánea durante 2 – 3 segundos.

F1	F2	F3	F4
Ajuste de cambio	Ir hacia arriba en el menú de ajuste	Ir hacia abajo en el menú de ajuste	Archivar ajustes y salir del menú de ajuste

### Función de los pulsadores MA 25e

#### Función de pulsadores del MA 25e

F1	F2	F3	F4
Bascular entre derecha e izquierda	Almacenar el valor de umbral	Pulsar encender/apagar	Vobular Encender/apagar

<b>60 dBHL Función de voz</b>
Derecha

**Función de voz:** Mantener pulsado el mando del nivel auditivo dB. Para ajustar el nivel de función de voz hay que mantener pulsado y girar el mando del nivel auditivo dB.

#### Pulsadores de función especial MA 25e pulsando el mando de frecuencia

F1	F2	F3	F4
Borrar todos los umbrales auditivos almacenados en la memoria interna	Almacenar un punto de umbral no oído	Presentar un umbral auditivo almacenado en la memoria interna	Empezar el test automático de Hughson Westlake (HW)