

MANUAL DE USUARIO

EDICIÓN 02



BÁSCULA MECÁNICA

Kinlee DT02

General ASDE

Albocácer, 25

Tel. 963 391 780

Fax 963 624 849

46020 Valencia



www.generalasde.com

No puede reproducirse ningún extracto, en cualquier forma posible, electrónicamente o de ningún otro modo, con cualquier propósito que no sea el de uso personal, sin el permiso previo por escrito de General ASDE.

REGISTRO

Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestra empresa.

En General Asde ofrecemos un servicio integral a los Centros de Reconocimiento Médico desde 1982.

Con nosotros encontrará asesoramiento en la instalación de su Centro, suministro de los equipos necesarios y su mantenimiento. También ofrecemos el programa de Gestión Integral de Centros GIC y un soporte técnico capaz de solucionarles las dudas como si estuvieran a su lado mediante el sistema de acceso remoto.


Por todo ello, sea bienvenido a la gran familia de General Asde.



Equipo Psicotécnico



Visión Screener

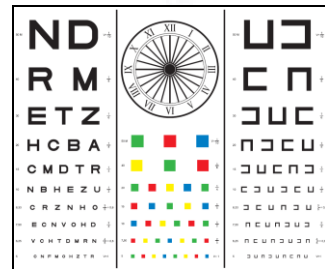

Optotipo



Cabina Insonorizada



Campímetro de Cúpula



Frontofocómetro

Y mucho más...

Regístrese en nuestra Página Web para obtener importantes ventajas, permanecer siempre informado de las últimas novedades del Sector y acceder a ofertas únicas.

ASDE OPERATOR

ACCESO CENTROS

ACCESO CENTROS - ASISTENCIA REMOTA

Inicio

General ASDE Diseño, Fabricación y Mantenimiento de Producto Sanitario

General ASDE SA ofrece desde hace más de 30 años un Servicio Integral a Centros de Reconocimiento Médico y Psicotécnico, la Calidad nos diferencia.

- Fabricantes de **Producto Sanitario** inscritos antes la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario con el Nº de Licencia 6366-PS.
- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001** certificado por Bureau Veritas Certification, Diseño y Fabricación en colaboración con los profesionales de la oftalmología, la medicina general y la psicología.

Juntos, seguimos avanzando.

OFERTA DEL MES

SOLICITUD ASISTENCIA GIC (e) WIN

General ASDE SA
C/ Albocácer, 25
46020 Valencia, España
Teléfono: 963 391 780
Fax: 963 624 849

Acceso centros | Acceso profesionales | Aviso legal | Condiciones y términos de uso | Política de privacidad | Mapa Web

General Asde, SA CIF A-46328902. Inscrita Reg. Merc. de Valencia. Tomo 1.801 gral. 1.139 de la sección 3ª de L. de Sociedades, folio 124 hoja nº 11.673. Inscrip. 1ª.

BÁSCULA MECÁNICA DT02

Nº de Nº Serie:

Fecha de Compra:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE EQUIPO				
1ª Calibración	2ª Calibración	3ª Calibración	4ª Calibración	5ª Calibración

MANUAL DEL USUARIO

Báscula Mecánica Kinlee DT02

ÍNDICE

	Pág.
1.- Introducción y recomendaciones básicas	6
2.- Características Generales	7
3.- Instrucciones de Uso	8

1.- INTRODUCCIÓN Y RECOMENDACIONES BÁSICAS.

La Báscula Mecánica DT02 es un producto de precisión y por tanto debe ser tratado con sumo cuidado y delicadeza.

La báscula ha sido diseñada con la finalidad de obtener información precisa y fiable del peso de una persona con múltiples finalidades.

Primero, verifique el contenido del embalaje. Usted debe encontrar el siguiente material:

- Balanza
- Manual de Usuario

A continuación se indican **LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS MUY IMPORTANTES** para su correcto uso.

1-Para su empleo ubique la báscula sobre una superficie firme, nivelada y segura, lejos de salpicaduras de agua o donde pueda provocar que las personas se tropiecen con ella.

2-No realices movimientos bruscos sobre la báscula, ya que esto puede dañarla de forma irreversible.

3-Evitar cualquier golpe y sobrecarga por encima del peso máximo.

4-No colocar ningún peso en la superficie de la báscula cuando ésta no esté en uso.


5-El fabricante recomienda para asegurar el buen estado de funcionamiento, calibrado y conservación del equipo una calibración periódica de 12 meses.

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.

La báscula es un instrumento de medida de masa, cuenta con un manejo sencillo que facilita su utilización.

Ésta báscula de acero inoxidable está diseñada para poder ser trasladada fácilmente de un lugar a otro, pero siempre debe hacerse con sumo cuidado y delicadeza puesto que se trata de un equipo de precisión.

Funciona de manera mecánica con lo que no necesita pilas ni ningún otro sistema de energía externo.

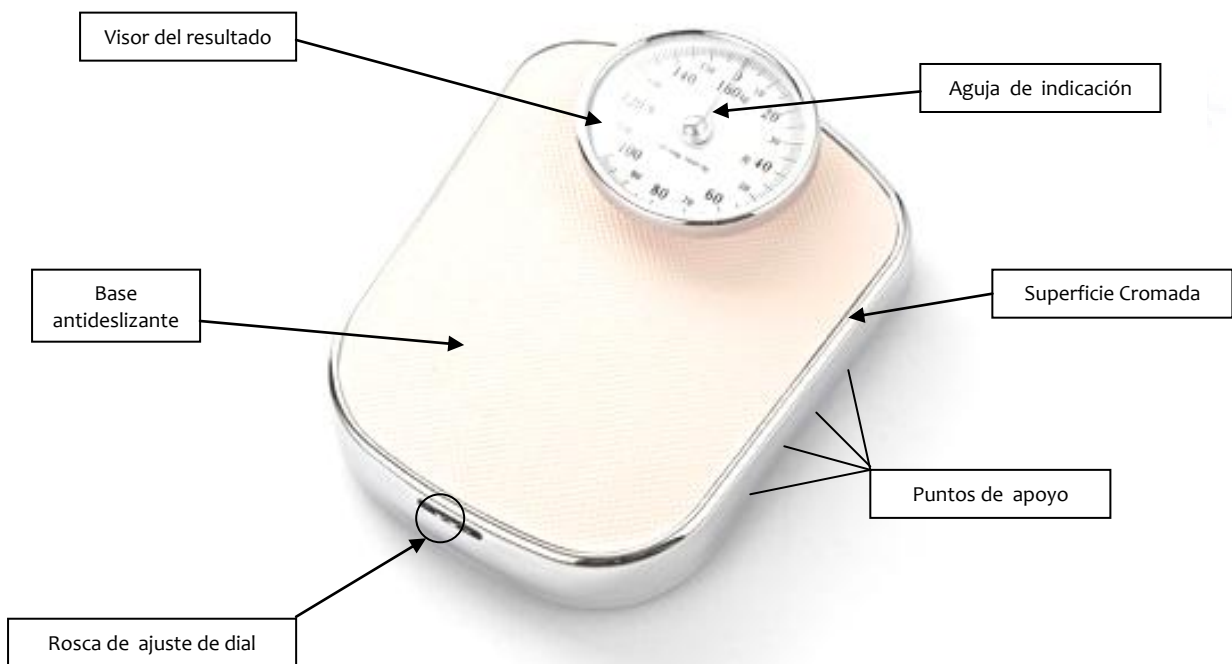

Características Técnicas

Capacidad máxima:	160 kg.
División	1 Kg.
Tamaño:	34,5 x 28,5 x 10,5 cm.
Material	Acero cromado.

3.- INSTRUCCIONES DE USO

- Ubique la balanza sobre una superficie firme y nivelada.
- La balanza debe ser usada en áreas libres de corrientes excesivas de aire, vibraciones, temperatura excesiva o humedad extrema.
- Ajuste la posición del dial a cero con la rosca de ajuste en la base de la plataforma.
- Para una medida más precisa se recomienda descalzarse.
- Subir a la báscula hasta que la aguja de indicación marque el peso.
- Ningún objeto debe estar en contacto con la báscula.
- Distribuya el peso uniformemente sobre la base antideslizante de la báscula.
- Si al bajar de la báscula, la aguja de indicación de peso, no vuelve a cero, reajuste el dial con la rosca de ajuste y repita el pesaje.

General ASDE

Albocácer, 25
Tel. 963 391 780
Fax 963 624 849
46020 Valencia

Concepto, creación y realización de manual:
Copyright © GENERAL ASDE 2013



www.generaldasde.com

No puede reproducirse ningún extracto, en cualquier forma posible, electrónicamente o de ningún otro modo, con cualquier propósito que no sea el de uso personal, sin el permiso previo por escrito de General ASDE.